

Made by: 20.03.2013 EL  
 Checked by: 20.03.2013 MH  
 Accepted by: 20.03.2013 MH

M8318  
 1.1

## SpiroSafe-virtausanturin käyttö- ja turvallisuusohje

### SpiroSafe-virtausantureiden laadunvalvonta

Medikron valmistama SpiroSafe-virtausanturi toimii verkko-tyyppisen virtausanturin periaatteella. Jokainen SpiroSafe-virtausanturi on tarkastettu ja mitattu laadun varmistamiseksi.

### Varoitukset

Tämän asennusohjeen varoitusosa määrittelee niitä tilanteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa potilaan loukkaantumiseen, sairastumiseen tai kuolemaan.

**VAROITUS.** SpiroSafe-virtausanturi on kertakäyttöinen tuote.

**VAROITUS.** Älä pese SpiroSafe-virtausanturia. Peseminen lisää ristitartunnan riskiä ja muuttaa mitattuja tuloksia merkittävästi. Jos kertakäyttöistä virtausanturia pestään, Medikro ei takaa järjestelmän mittaustarkkuutta.

**VAROITUS.** SpiroSafe -virtausantureita ei ole pakattu steriilisti.

**VAROITUS.** Älä sekoita puhtaita ja käytettyjä SpiroSafe -virtausantureita keskenään.

**VAROITUS.** Käytä uutta, puhdasta SpiroSafe -virtausanturia jokaiselle potilaalle.

### Huomautukset

Tämän asennusohjeen huomautusosa määrittelee niitä tilanteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa laitteen rikkoutumiseen, vikautumiseen tai tietojen häviämiseen.

**HUOMAUTUS.** Käytä näitä kertakäyttöisiä SpiroSafe-virtausantureita seuraavien mittalaitteiden kanssa: Medikro Domo, Medikro Nano, Medikro Primo, Medikro Pro ja Medikro Evo.

**HUOMAUTUS.** Sulje avattu pakkaus.

**HUOMAUTUS.** Kalibroi spirometriajärjestelmä käyttöohjeiden mukaisesti.

**HUOMAUTUS.** Älä koskaan kalibroi spirometria käytetyllä SpiroSafe-virtausanturilla. Tämä aiheuttaa ristitartunnan riskin kalibrointipumpun kautta.

**HUOMAUTUS.** Asiakas voi pitää kertakäyttöistä virtausanturia helposti hampaiden välissä. (Käsien käyttö ei ole tarpeellista.)

**HUOMAUTUS.** Jokaisella kerralla, kun avaat SpiroSafe-virtausanturipakkauksen, tarkista virtausantureiden kalibrointikoodi pakkauksen ulkopintaan kiinnitetystä tarrasta. Jos tämä kalibrointikoodi eroaa käytössä olevasta koodista, uusi koodi täytyy ottaa käyttöön ennen mittaukseen siirtymistä. Väärän kalibrointikoodin käyttäminen voi johtaa epätarkkoihin mittaustuloksiin.

### Uuden virtausanturipakkauksen käyttöönotto

Kun otat käyttöön uuden SpiroSafe -virtausanturipakkauksen, tarkista virtausantureiden kalibrointikoodi pakkauksen ulkopintaan kiinnitetystä tarrasta. Jos tämä kalibrointikoodi eroaa käytössä olevasta koodista, uusi koodi täytyy ottaa käyttöön ennen mittaukseen siirtymistä. Lue ohjeet Käyttäjän oppaasta.



Kalibrointi koodi (ainoastaan Medikro Spirometria ohjelmistoa varten).

### Hävittämisohjeet ja materiaalit

EAN-koodeille: 6420099000554, 6420099000561, 6420099000578, 6420099000585, 6420099000592, 6420099000608 ja 6420099000615

Materiaalit: Virtausanturi: PEHD, Sisäpussi: PELD, Yksittäispussi: OPP ja Ulkolaatikko: Aaltopahvi

Virtausanturi, sisäpussi, yksittäispussi sekä ulkolaatikko tulee hävittää kansallisten tai paikallisten lakien tai oman toimipisteesi hävitysohjeiden mukaisesti. Kaikki materiaalit ovat kierrätettäviä tai poltettavia. Kaikista materiaaleista on pyynnöstä saatavissa tuoteturvatiedote.

Tämän tuotteen CE -merkki kertoo, että se täyttää lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY.

**HUOMAUTUS.** Katso neuvoja Käyttäjän oppaasta tai muista asiaan liittyvistä dokumenteista.

### Medikro Oy

Postiosoite: P.O.Box 54, FI-70101 Kuopio, Finland  
 Katuosoite: Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland

Puh.: +358 17 283 3000  
 Fax: +358 17 283 3300  
 E-mail: myynti@medikro.fi  
 Kotisivu: www.medikro.fi

Y-tunnus: 0288691-7  
 V.A.T.: FI02886917  
 Kotipaikka: Kuopio