


Made by: 2018-09-24 AIOLOS MEDICAL AB M8320
Checked by: 2018-09-24 EK 1.2
Accepted by: 2018-09-24 JPT

Medikro Grip -handtag användning och rengörings instruktioner

Funktionsbeskrivning

Tryck ned flödesgivaren ned i handtaget tills den är säkrad.

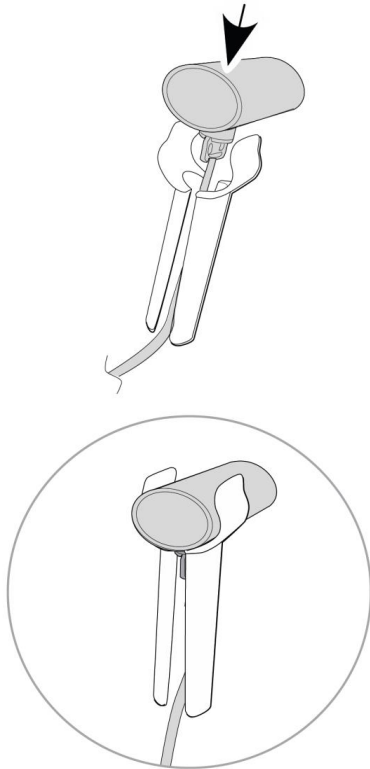

Varning

En varningstext i denna instruktion är en varning av ett tillstånd som kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall.

VARNING Håll det återanvändbara handtaget rent. Patientkontakt med förorenad utrustning kan sprida infektioner.

VARNING Handtaget är förpackat som icke-sterilt.

Försiktighetsåtgärder

En försiktighetsåtgärd i denna installationsguide identifierar ett tillstånd eller i praktiken kan leda till fel på utrustningen, skada på utrustningen eller förlorad data.

FÖRSIKTIGHET Använd handtaget med följande spirometrar: Medikro Nano, Medikro Primo och Medikro Pro.

FÖRSIKTIGHET Rengör handtaget efter varje patient.

Rengöringsinstruktioner

Rengör handtaget rutinmässigt. Följande medel är kompatibla med handtaget:

- 70 % isopropylalkohol
- 10 % klorblekmedellösning
- 55-60 % etanol

Försiktighetsåtgärder

En försiktighetsåtgärd i denna installationsguide identifierar ett tillstånd eller i praktiken kan leda till fel på utrustningen, skada på utrustningen eller förlorad data.

FÖRSIKTIGHET Vid rengöring av handtaget, undvik att använda trasor eller lösningar som innehåller kvaternära ammoniumföreningar (ammoniumklorider) eller glutaraldehydbaserade desinfektionsmedel.

FÖRSIKTIGHET Obs! Desinficera enligt er kliniks rutiner och standarder eller lokala bestämmelser.

Avfallshantering och material

För GTIN-koder: 06420099000684 och 06420099000691

Material: Grepp: PA66, Singelförpackning: OPP+PE, Extern kartong: Vellpapp och Externpåse: PP

Kassera greppet, den inre påsen och den yttre kartongen enligt nationella eller lokala lagar eller enligt din anläggnings avfallssorteringspolicy. Allt material är återvinningsbart eller brännbart. Produktsäkerhetsbladet är tillgängligt, på begäran, för var och en av materialen.

CE-märket på denna produkt indikerar att det överensstämmer med bestämmelserna i Council Directive 93/42/EEG.

FÖRSIKTIGHET Läs användarmanualen och andra medföljande dokument.

Medikro Oy

Mail address: P.O.Box 54, FI-70101 Kuopio, Finland
Street address: Pioneerinkatu 3, FI-70800 Kuopio, Finland

Tel: +358 44 777 7003
E-mail: sales@medikro.com
Home page: www.medikro.com

Business Identity Code: 0288691-7
V.A.T.: FI02886917
Domicile: Kuopio