


Medikro Spirometriaohjelmisto • Pikaohje

Spirometriatutkimuksen kulku:

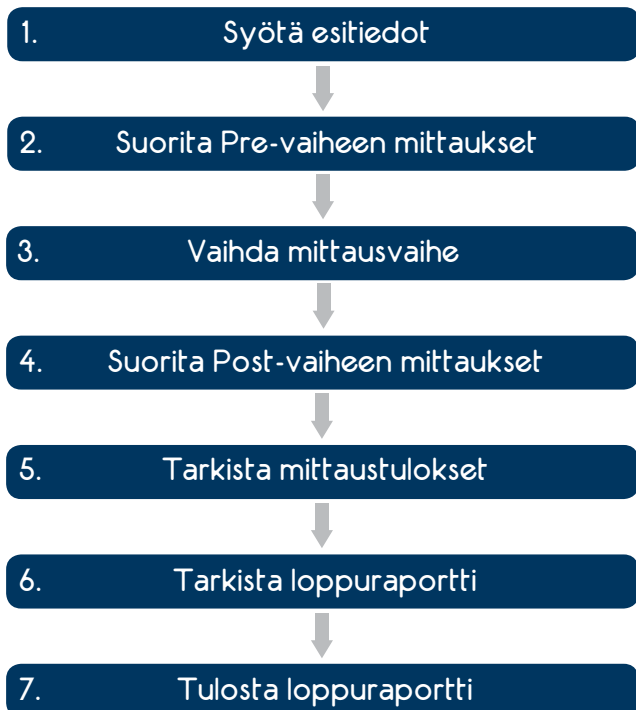

Muita suosituksia:

- ERS ja ATS suosittavat päivittäistä spirometriän kalibroinnin tarkastamista 3000ml kalibrointipumpulla. Spirometriaohjelmiston kalibroinnin seurantaliedosto tallioi kaikki kalibrointitoimenpiteet.
- Käyttäjän pitää tarkistaa, että tutkittavalle käytetään oikeita viitearvostoja.
- Käyttäjän pitää tarkistaa, että oikea kalibrointikoodi on käytössä.
- Jos käytössäsi ei ole Medikro Pro tai Medikro Ambi mittalaitetta sinun tulee tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa päivittäin ohjelmiston käyttämät ympäristöolosuhteet: lämpötila, ilmanpaine ja kosteus.
- Käyttäjän tulee opastaa tutkittavaa ennen mittauksen suoritusta.
- Käyttäjän tulee varmistaa, että jokaiselle tutkittavalle vaihdetaan uusi virtausanturi ja nenäpuristin.

MEDIKRO

Pioneerinkatu 3, 70800 Kuopio
044 777 7007
tuki@medikro.fi

PL 54, 70101, Kuopio
www.medikro.fi

Mittauksen poistaminen


5 Mittauskäyrien ja -tulosten katsominen

6 Raportin esikatselu

7 Raportin tulostus

Kalibrointi

Tutkimuksen lopetus

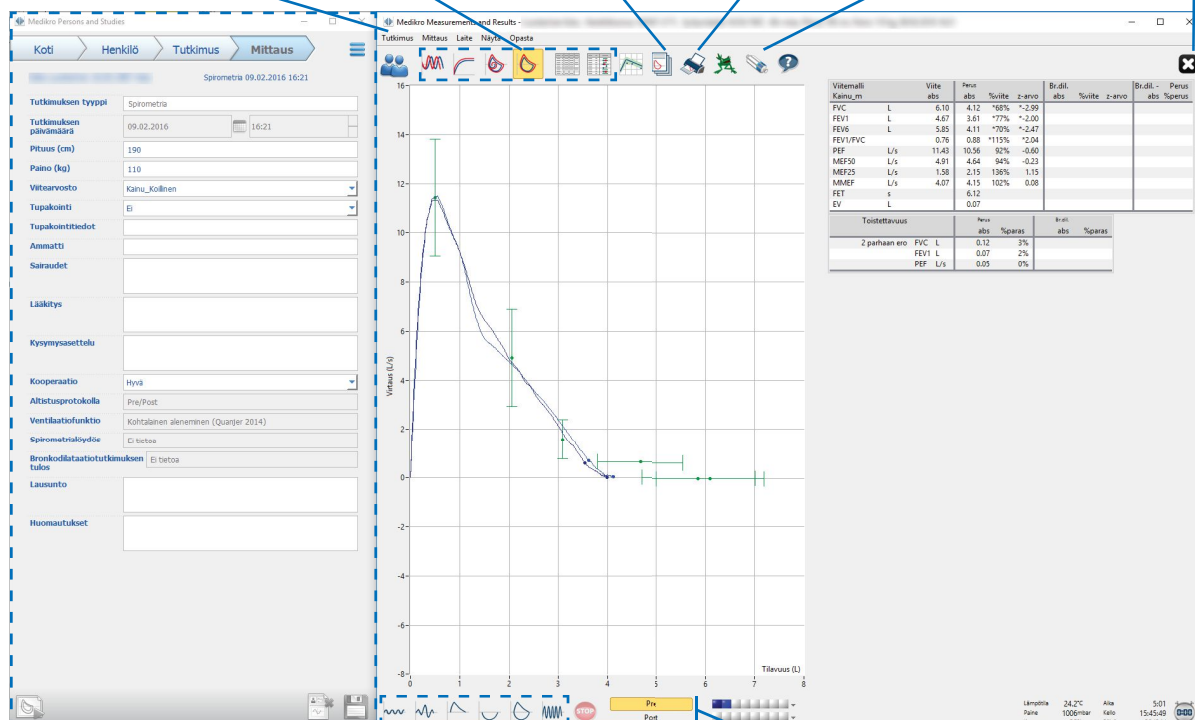

1 Esitietojen syöttö

2&4 Mittauksen valinta

Mittauksen lopetus

3 Mittausvaiheen vaihto