


## Medikro Grip -handtag användning och rengörings instruktioner

### Funktionsbeskrivning

Tryck ned flödesgivaren ned i handtaget tills den är säkrad.

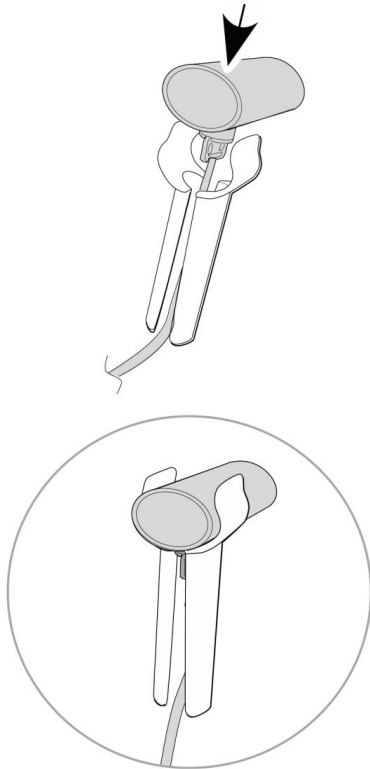

### Varning

En varningstext i denna instruktion är en varning av ett tillstånd som kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall.

**VARNING** Håll det återanvändbara handtaget rent. Patientkontakt med förorenad utrustning kan sprida infektioner.

**VARNING** Handtaget är förpackat som icke-sterilt.

### Försiktighetsåtgärder

En försiktighetsåtgärd i denna installationsguide identifierar ett tillstånd eller i praktiken kan leda till fel på utrustningen, skada på utrustningen eller förlorad data.

**FÖRSIKTIGHET** Använd handtaget med följande spirometrar: Medikro Nano, Medikro Primo och Medikro Pro.

**FÖRSIKTIGHET** Rengör handtaget efter varje patient.

### Rengöringsinstruktioner

Rengör rutinemässigt enligt din kliniks rutiner och standarder eller lokala bestämmelser.

Följande medel är kompatibla med handtaget:

- 70 % isopropylalkohol
- 10 % klorblekmedellösning
- 55-60 % etanol

### Försiktighetsåtgärder

En försiktighetsåtgärd i denna installationsguide identifierar ett tillstånd eller i praktiken kan leda till fel på utrustningen, skada på utrustningen eller förlorad data.

**FÖRSIKTIGHET** Vid rengöring av handtaget, undvik att använda trasor eller lösningar som innehåller kvaternära ammoniumföreningar (ammoniumklorider) eller glutaraldehydbaserade desinfektionsmedel.

**FÖRSIKTIGHET** Obs! Desinficera enligt er kliniks rutiner och standarder eller lokala bestämmelser.

### Avfallshantering och material

För GTIN-koder: 06420099000684 och 06420099000691

Material: Grepp: PA66, Singelförpackning: OPP+PE, Extern kartong: Vellapp och Externpåse: PP

Kassera greppet, den inre påsen och den yttre kartongen enligt nationella eller lokala lagar eller enligt din anläggnings avfallssorteringspolicy. Allt material är återvinningsbart eller brännbart. Produktsäkerhetsbladet är tillgängligt, på begäran, för var och en av materialen.

CE-märket på denna produkt indikerar att det överensstämmer med bestämmelserna i Council Directive 93/42/EEG.

**FÖRSIKTIGHET** Läs användarmanualen och andra medföljande dokument.